



LANCEMENT NOUVEL ECOUTEUR SERIE 200

Avec

CLEAR  **SOUND™**

PARE CERUMEN SYSTEM

C'est un fait. Le cérumen est souvent la cause d'un dysfonctionnement de l'écouteur. L'aide auditive peut être faible ou même n'émettre aucun son.

Maintenant, avec l'arrivée du nouvel écouteur série 200, **Sebotek®** apporte une protection maximale grâce au nouveau système contre le cérumen. Conçu pour que l'utilisateur puisse le changer facilement et lui apporter un résultat quotidien optimal.

IMPORTANT :

L'utilisation du nouvel écouteur sans la protection contre le cérumen peut causer des dommages sur l'écouteur. Le pare cérumen doit être constamment mis en place sur l'écouteur.

Le nouvel écouteur série 200 est conçu pour être utilisé uniquement avec les **nouveaux embouts** série 300.

Pour toutes Informations :

Service Technique : technique@biotone.fr

Date de Disponibilité :

Septembre 2006.

Disponibilité :

Écouteur + sachet de 3 pare cérumen.
Sachet de 10 pare cérumen.

La Traçabilité :

Chaque module écouteur comporte un numéro de série, afin de suivre avec précision la garantie de chaque unité livrée.

Les Avantages :

La capsule enrobant l'écouteur est plus petite (permet ainsi d'adapter le système sur des conduits plus délicats, plus petits, plus sensibles...).

Écouteur équipé d'un nouveau système de protection contre le cérumen.

Chaque écouteur est livré avec un sachet de 3 pare cérumen.

Toujours 3 tailles disponibles (Small – Medium – Large) oreille droite et gauche.

Conditions de retour :

Chaque module écouteur doit être **impérativement** retourné dans son emballage d'origine et **non ouvert**.

Le sachet de 3 pare cérumen devra obligatoirement accompagner l'écouteur.

SEBOTEK
HEARING SYSTEMS

Merci de Votre Confiance !

BIOTONE




REEMPLACEMENT DU PARE CERUMEN

A : En tenant le corp de l'écouteur, faites glisser vers l'arrière la partie parapluie de l'embout, de façon à découvrir le pare cérumen totalement.




B : Pour enlever la protection contre le cérumen, faites glisser la partie entaillée de l'outil sous le pare cérumen.

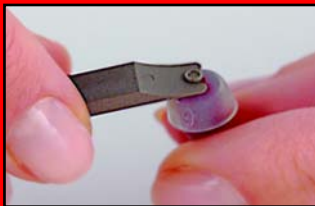

C : Prenez un nouveau pare cérumen, comme indiqué. Assurez-vous qu'il soit placé correctement (partie filtre contre votre index).



D : Placez le nouveau pare cérumen directement dans l'orifice de l'écouteur.

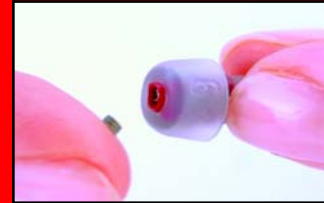

Appuyez dessus pour le mettre en place et le bloquer.



E : Faites glisser la partie parapluie de l'embout vers l'avant, afin de recouvrir totalement l'écouteur.



Puis tirez sur la partie parapluie de l'embout, afin de le remettre en position idéale.



Note :

le pare cérumen doit être changé lorsque le son devient plus faible.

SEBOTEK
HEARING SYSTEMS

Merci de Votre Confiance !

BIOTONE