



PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET RECOMMANDATIONS ZPOWER

Suite aux analyses faites sur les retours en SAV des produits Zpower, nous avons constaté que la dégradation des accumulateurs **silver-zinc** vient essentiellement d'un défaut d'utilisation.

- Lors de la livraison, les accumulateurs sont chargés totalement.
- Les aides auditives dotées de la technologie Zpower, doivent être chargées tous les soirs sans exception.
- Afin d'éviter les effets mémoire, les cycles de charge doivent être complets.
- Si les aides auditives ne sont pas utilisées durant une longue période, il est impératif de les laisser sur le socle chargeur alimenté ou de retirer les accumulateurs de leurs logements.
- Ne jamais ouvrir les logements de pile pour arrêter les aides auditives. Si le patient souhaite stopper ses appareils, il doit le faire via le bouton poussoir.

Afin d'utiliser de façon optimale la technologie Zpower et garantir une autonomie allant de 25 à 30 heures, **sans dégradation de l'accu silver-zinc**, il est impératif de respecter ces recommandations.

Merci pour votre collaboration.