

Merci d'avoir acheté la série professionnelle d'amplificateur de boucle à induction Audiofils. C'est une solution complète et fiable mais il est important de prendre le temps de lire attentivement cette notice d'installation, elle vous permettra de profiter de notre système durant de nombreuses années.

PREAMBULE

La majorité des problèmes avec la BIM (Boucle à Induction Magnétique) arrive quand l'installation n'a pas été correctement réfléchi, prenons un peu de temps avant de commencer l'installation et gagnons en résultat et en temps.

Idéalement l'amplificateur à boucle devra être placé près de la zone à couvrir. Ceci peut impliquer le placement de l'amplificateur sur un panneau, sous un bureau, sur un mur ou sous une table. Le microphone de prise de son devra également être placé le plus près possible de l'amplificateur. En ce qui concerne le placement du câble de boucle suivez précisément les indications expliqués dans ce document.


Important : Si vous rencontrez un problème majeur n'hésitez pas à contacter votre fournisseur afin de trouver des solutions.



DEBALLAGE DU PAQUET :

Des la réception de l'amplificateur inspectez le colis pour détecter les dommages qui auraient pu survenir pendant le transport. Si un des éléments ci-dessous est endommagé aviser votre distributeur et la société de transport immédiatement, en indiquant la date de livraison, la nature des dégâts et si aucun dommage n'était visible sur l'emballage avant de le déballer. Si possible donner le numéro de bordereau de livraison et un numéro de suivi.


Assurez-vous que votre boîte d'emballage comprend l'ensemble de ces éléments ci-dessous. Si des pièces sont manquantes, contactez votre fournisseur.

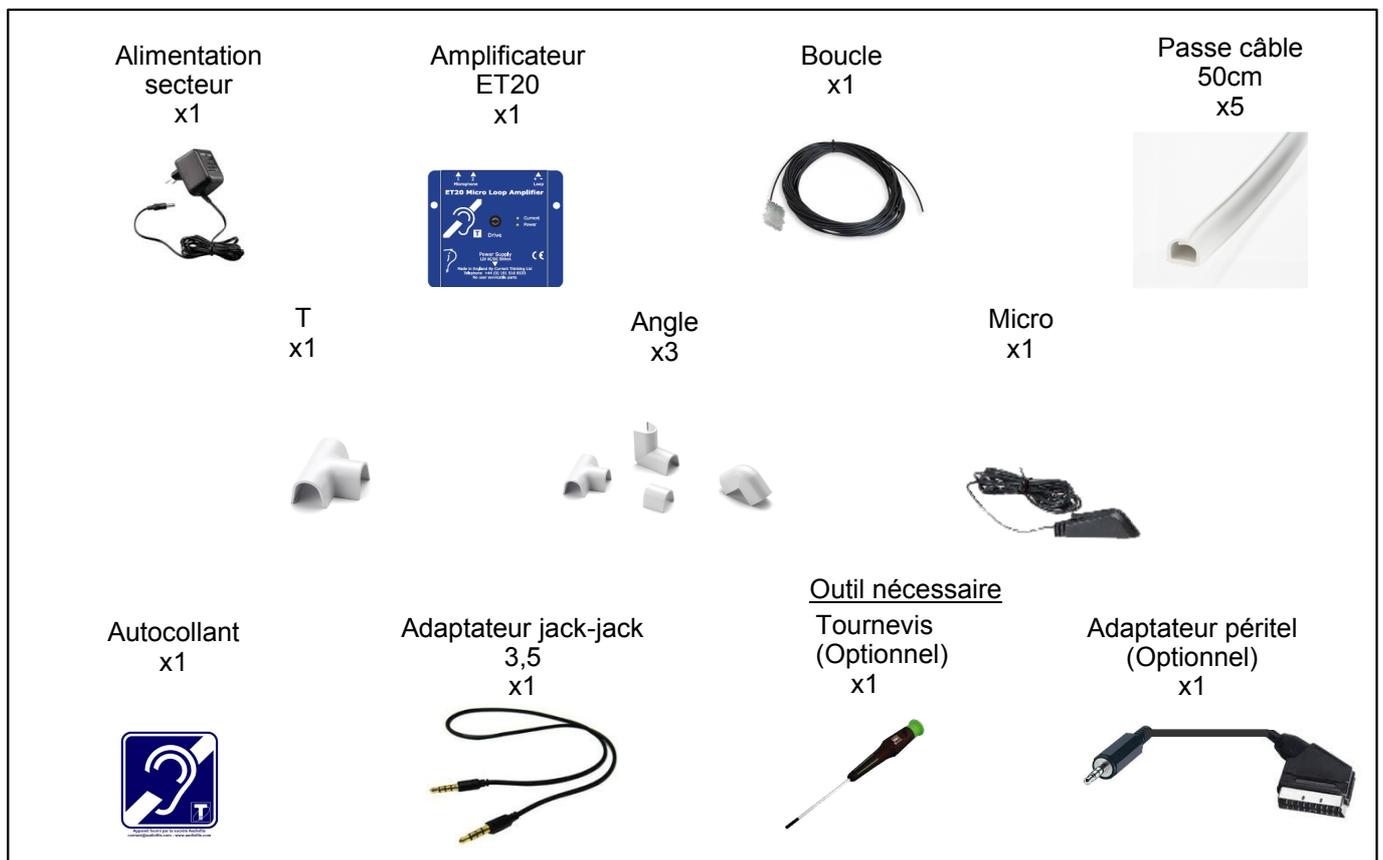

INSTALLATION DU SYSTEME :


1

Matériel nécessaire :

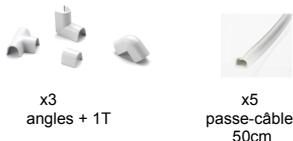

Positionnez et collez les passe-câbles autocollants ainsi que les angles de façon à délimiter une boucle sous votre bureau ou comptoir. Collez également la descente de façon vertical.

Attention de positionner les 2 longueurs de 23 cm du côté ou vous souhaitez placer l'amplificateur et la descente. Voir schéma.

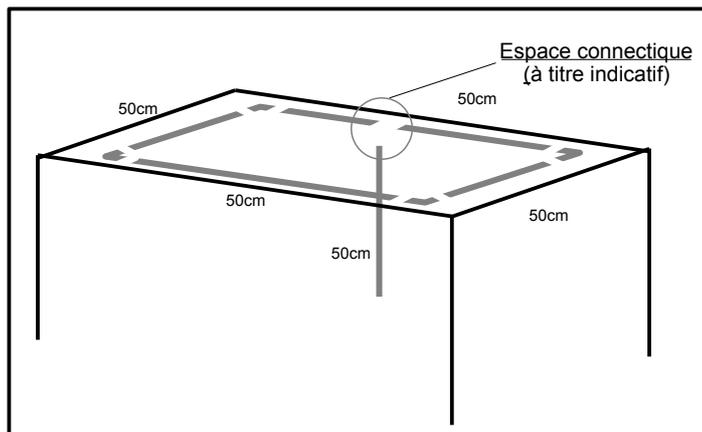

2

Matériel nécessaire :




Insérez le câble dans le passe-câble en caoutchouc de façon à positionner la connectique de la boucle dans l'espace (voir schéma numéro 1).



3

Connectez la boucle puis faites courir le câble jusqu'à l'emplacement final de l'amplificateur.

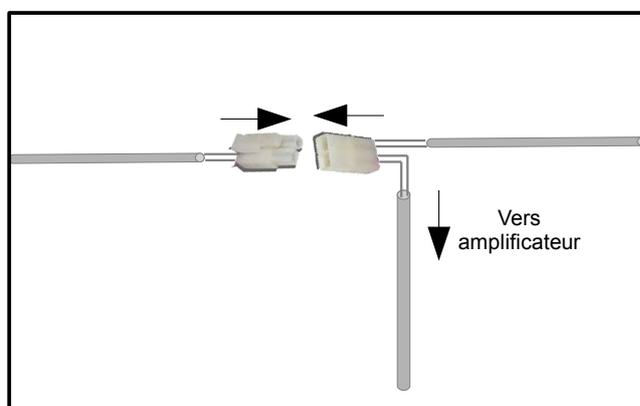

4


Matériel nécessaire :



x1 amplificateur

Fixez l'amplificateur en décollant l'adhésif situé au dos du boîtier puis connectez les deux câbles de boucle à l'amplificateur.

Note : Le sens de connexions des câbles n'est pas important

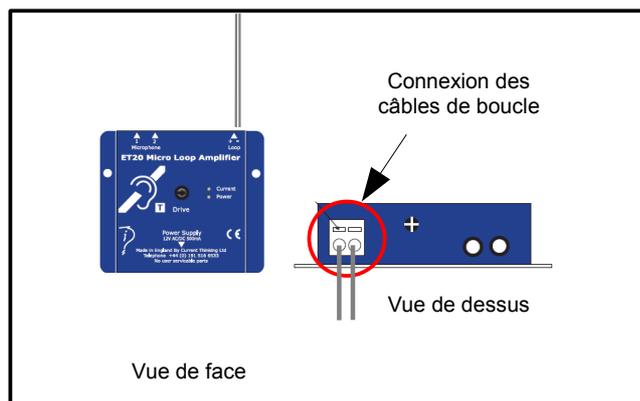

Biotone Technologie SAS

BP 53273 Villepinte - 95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Tél. 01 49 89 59 00 - Fax. 01 49 89 59 09

Email : biotone@biotone.fr


BRANCHEMENT ET CONNEXION :

5

Matériel nécessaire :




Branchez le micro fourni dans le kit sur l'entrée 1 de l'amplificateur, puis placez le micro sur le bureaux ou comptoir en direction de l'orateur (guichetier, audioprothésiste..). Vous pouvez coller le micro en décollant l'adhésif situé sous le micro.

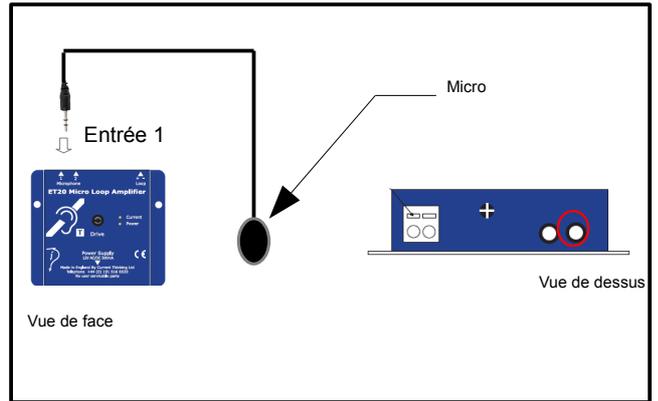

6

Branchez un des adaptateurs fourni dans le kit sur l'entrée 2 de l'amplificateur, puis l'autre extrémité du cordons (périel ou jack 3,5) à votre téléviseur, ordinateur ou lecteur audio

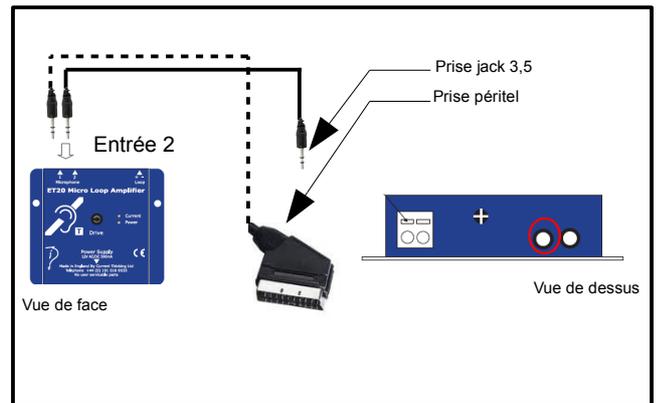


7

Matériel nécessaire :



Alimentez l'amplificateur à l'aide du câble d'alimentation fourni puis munissez vous d'un petit tournevis plat et d'un récepteur de boucle ETRX (+casque) ou d'une prothèse auditive placé sur la position « T ».

Parlez dans le micro tout en augmentant le son (drive) à l'aide du tournevis, puis ajustez au bon niveau sonore.

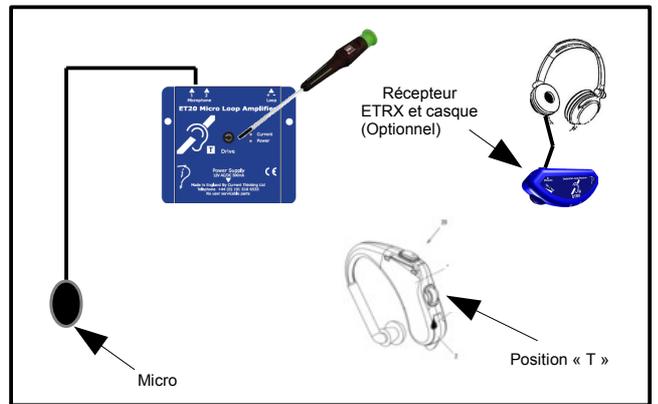

8

Matériel nécessaire :



Après avoir effectué ce premier réglage allumez votre téléviseur et réitérez l'écoute toujours à l'aide d'un récepteur ou d'une prothèse auditive.

