

Le nettoyage de l'embout

Les comprimés effervescents

Les **comprimés** effervescents **Audioline** ont été conçus tout spécialement pour le nettoyage de vos embouts. La solution de trempage contient un ingrédient détergeant et des composants antiseptiques donneurs d'oxygène actif. Après un trempage d'environ 30 minutes, le cérumen se désolidarise de la surface de votre embout. Ensuite, prenez votre embout, rincez-le et séchez-le avec une poire soufflante ou un spray air. Assurez-vous qu'il ne reste plus d'eau dans le tube et à l'intérieur de l'embout avant de le remettre sur l'aide auditive. Ces comprimés effervescents sont à **usage unique** ; une fois le nettoyage terminé, jetez l'eau. Nous vous conseillons un nettoyage complet de votre embout au minimum trois fois par mois.

Disponible en boîte de 20 Comprimés effervescents.

Les accessoires indispensables :
Gobelet de nettoyage avec tamis
Poire soufflante ou spray air

