

## Notice d'utilisation

# Perfect Dry®

Système de séchage électrique pour appareils auditifs

**Dans un premier temps nous tenons à vous féliciter d'avoir opté pour le système de séchage Perfect Dry®.**

Vos aides auditives subissent chaque jour des agressions multiples (transpiration, changement de température...), qui occasionnent souvent une oxydation prématurée de l'électronique, des dysfonctionnements, voire des pannes et donc pour vous, une privation de vos appareils pendant plusieurs jours. Avec le système Perfect Dry®, vous allez diminuer considérablement l'ensemble de ces contraintes.

## Précautions

N'utilisez que pour le séchage de vos aides auditives. Maintenez-la dans un endroit sec et propre. Ne pas utiliser dans l'eau. Ne pas recouvrir. N'utilisez pas de produits chimiques pour la nettoyer. Ne jamais ouvrir la partie électrique du système. En cas d'ouverture, la garantie serait annulée automatiquement.

## Description technique

Utilisez uniquement le transformateur livré avec la Perfect Dry®.

La Perfect Dry® opère sur une plage de température allant de 38° à 42° C.

## Garantie

La Perfect Dry® est garantie 1 an à compter de la date d'achat, la facture faisant foi. Cette garantie est valable dans le cadre d'une utilisation conforme aux prescriptions d'utilisation. En cas de panne, débranchez-la du secteur et contactez votre audioprothésiste. Sont exclues de cette garantie les détériorations dues à une cause étrangère à la Perfect Dry®, à une mauvaise utilisation, à un branchement non conforme, à l'effet de la foudre ou d'une surtension électrique.

## Information

Ce produit est soumis à la directive européenne 2002/96/CE relative à la prévention et la gestion des déchets d'équipement électriques et électroniques. Le symbole ci-dessous indique que ce produit fait l'objet d'une collecte sélective.

Nous vous recommandons de vous mettre en contact avec votre audioprothésiste ou avec notre service après vente pour suivre ces directives et exclure tous dommages environnementaux possibles.



**audioline**   
Hygiène des aides auditives  
**Biotone Technologie SAS**  
BP 53273 Villepinte  
95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex

**audioline**   
Hygiène des aides auditives

## Utilisation

Le meilleur moment pour assécher vos aides auditives est le soir au coucher.

Ouvrez les logements de pile **complètement**, placez vos aides auditives avec les embouts dans la Perfect Dry®, puis refermez-la.

Branchez ensuite le cordon côté jack à la prise de la boîte (Fig.1), puis branchez le cordon côté transformateur sur une prise de courant. Utilisez l'interrupteur au dos de la Perfect Dry® pour lancer le cycle de séchage (Fig.2), le voyant vert s'allume (Fig3).

Le système est équipé d'une temporisation (environ : 2h15). Au-delà de ce délai la Perfect Dry® s'arrête automatiquement (le voyant vert éteint). Ce qui vous évite de débrancher le système une fois le séchage terminé.


Quand vous désirez relancer ou arrêter le cycle de séchage : utilisez l'interrupteur (Fig.2).

A certaines périodes de l'année (été) ou si vous travaillez dans des endroits très humides (ex : cuisine professionnelle), vous pouvez optimiser le séchage en ajoutant une capsule déshydratante dans la boîte (Fig.4). Demandez conseil à votre audioprothésiste Entendre.

## Nettoyage de la Perfect Dry®

Nettoyez au minimum une fois par semaine l'intérieur de la boîte à l'aide d'un chiffon sec et propre.

Fig.1

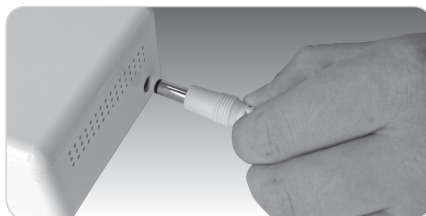

Branchez délicatement le jack à la Perfect Dry®

Fig.2 - Face arrière



Interrupteur pour lancer le cycle de séchage

Fig.3 - Face avant



Voyant vert allumé = cycle de séchage activé

Fig.4



La capsule déshydratante va optimiser le fonctionnement de la Perfect Dry®